

## **Návod na použití odběrových souprav pro virologické vyšetření**

(Diagnostika chřipky - sezónní i pandemické, nechřipkových virů, enterovirů.)

Součásti odběrové soupravy: 2 sterilní výtěrové tampóny, zkumavka s odběrovým médiem  
Soupravy na požádání dodáme: tel.: 266 082 637, 266 082 622, 266 082 638

### **Postup při odběru nazofaryngeálního výtěru:**

1. Při manipulaci s odběrovou soupravou dodržujte přísně sterilní podmínky.
2. Odběr provádějte co nejdříve od začátku onemocnění (2. - 3. den), nejlépe po ránu - na lačno před hygienou ústní dutiny a podáváním léků (některé chemikálie znemožňují interpretaci rychlých laboratorních testů).
3. Výtěr se provádí dvěma tampóny – prvním vyčistíte obě nosní dírky a druhým velmi důkladně setřete epitelální buňky zadní stěny nosohltanu. Doporučuje se předem nechat pacienta 2x zakašlat. Vložte oba tampóny do jedné zkumavky s odběrovým médiem. Odstříhnete konce tampónu, aniž byste se dotkli okraje zkumavky a pevně uzavřete.

### **Nedotýkejte se jazyka, patrových oblouků a tonzil!**

4. Zkumavku řádně označte štítkem se jménem a identifikačním číslem pacienta (číslo pojištěnce). Na žádance o vyšetření shodně vyplňte jméno a číslo pojištěnce, kód zdravotní pojišťovny, datum a hodinu odběru, popř. symptomy a terapii. Velmi důležité je jméno lékaře, IČZ a telefon, na který lze hlásit výsledky laboratorního vyšetření.
5. Vzorky je třeba odeslat ke zpracování do laboratoře co nejdříve.

**Pokud nelze zajistit okamžité zpracování vzorku, lze je uchovat až 48 hodin při 2-8°C. Pro delší uchování je vhodná teplota nižší než -70°C. Zásadně neskladujte při -20°C! Tato teplota zhoršuje životaschopnost virů a znemožňuje případnou konfirmaci pozitivního výsledku a další typizaci viru.**

*OKM - Virologie  
Centrální laboratoře  
Nemocnice Na Bulovce*